

SOMMAIRE

Lumière sur FHOS

Des résultats jamais vus en esthétique.

Le soin sur-mesure

Une gamme cosmétique associée à la lumière.

La technologie bioluminescente

La gamme de produits et le procédé FHOS exclusif.

La cosmétique bioluminescente

L'expertise, la personnalisation et l'efficacité immédiate.

PROCYON: la technologie

Les performances techniques et les plus de la technologie.

Le protocole sur-mesure

Le déroulé du soin et ses avantages.

La gamme de soin

Un offre de soin mixte pour les pro.

La gamme retail

Poursuivez les bienfaits de votre soin où que vous soyez.

Avant-après

Des clients partagent leur expérience.

Témoignages

Des célébrités partagent leur ressenti.

The background features a central FHOS aesthetic device with a blue screen and two treatment heads. It is surrounded by various FHOS skincare products, including bottles and tubes, all set against a dark, atmospheric background with glowing light effects.

LUMIÈRE SUR FHOS

DÉCOUVREZ DES RÉSULTATS JAMAIS VUS EN ESTHÉTIQUE AVEC UNE TECHNOLOGIE BIOLUMINESCENTE EXCLUSIVE.

Plongez au cœur de l'innovation avec FHOS, où la technologie de soins par lumière pulsée embrasse l'univers de l'esthétique. En tant que pionnier dans le domaine des soins de beauté bioluminescents, Grâce à une synergie unique entre une technologie bioluminescente avancée avec des actifs nanoencapsulés activés par une lumière intense sous forme de flashes. C'est dans cet esprit que nous avons développé une technologie photoluminique novatrice, conçue pour transcender les attentes les plus exigeantes.

Cette technologie, alliée à notre expertise unique, marquant ainsi le début d'une nouvelle dimension de beauté intérieure et extérieure. Chaque soin, inspiré de la médecine esthétique et adapté aux besoins spécifiques de votre peau, est une invitation à découvrir des résultats immédiats et spectaculaires, visibles dès les premières 15 minutes. Nous nous engageons à être votre partenaire privilégié, éclairant votre chemin vers la beauté avec des soins personnalisés et avant-gardistes.


FHOS est plus qu'une marque ; c'est une promesse de réinvention de la beauté, où chaque produit est une porte ouverte vers des possibilités infinies de soins esthétiques hautement efficaces et respectueux de votre peau. Découvrez le futur de l'esthétique avec FHOS, où l'innovation, l'efficacité et la satisfaction sont au cœur de chaque création. Bienvenue dans l'ère de la beauté bioluminescente, où chaque moment avec FHOS est une expérience transformatrice.

FHOS : LE SOIN SUR-MESURE ACTIVÉ PAR LA LUMIÈRE INTENSE

Une gamme de
cosmétique
nanoencapsulée
nouvelle génération
associée à la lumière de la
technologie PROCYON.

FHOS se distingue par sa capacité à offrir des soins personnalisés, révolutionnant ainsi l'approche traditionnelle de la technologie en soin esthétique et l'alliance d'une gamme de soin cosmétique et de la tech.

FHOS transcende l'idée même de soins esthétiques, en proposant une expérience totalement adaptée à la physiologie unique de chaque peau. Il ne s'agit plus seulement de traiter mais de transformer, grâce à une approche qui respecte et valorise la singularité de chaque individu. Avec FHOS, découvrez le pouvoir d'un soin réellement sur mesure, où chaque session est une étape vers la réalisation d'un idéal de beauté et de bien-être.

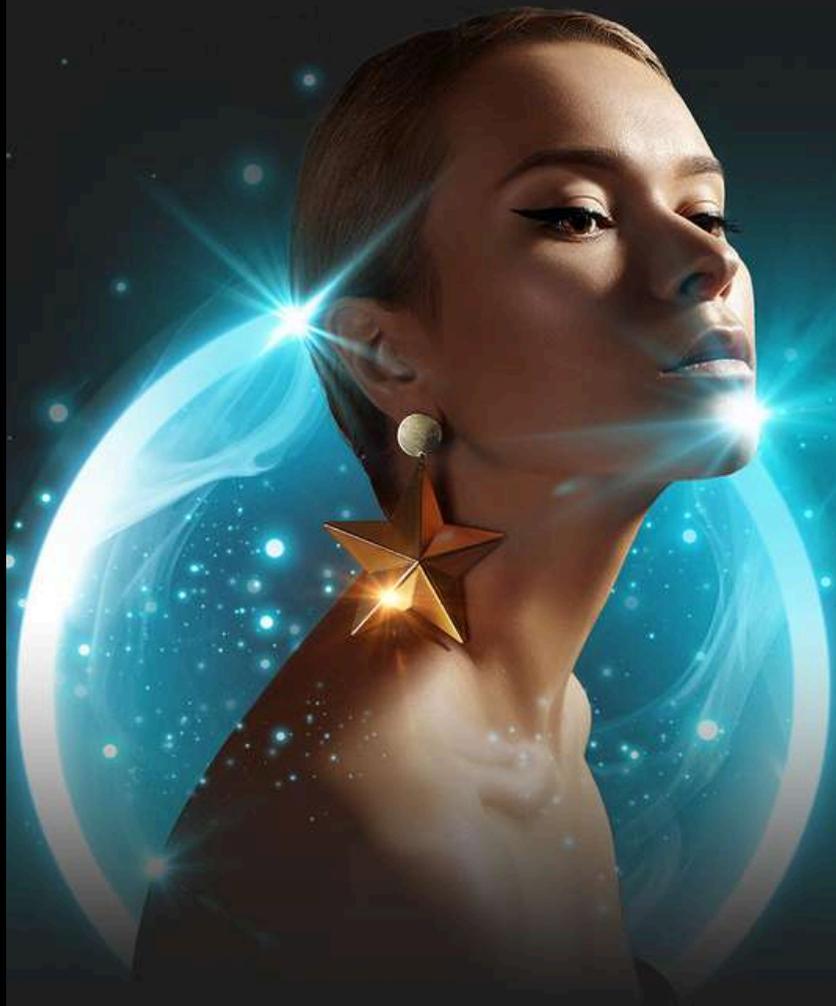

L'EXPERTISE LA PERSONNALISATION, & L'EFFICACITÉ IMMÉDIATE

FHOS se distingue par sa capacité à offrir des soins personnalisés, révolutionnant ainsi l'approche traditionnelle de la technologie en soin esthétique et l'alliance d'une gamme de soin cosmétique et de la technologie.

L'EXPERTISE

Au cœur de notre révolution se trouve la technologie FHOS PROCYON, un équipement de lumière intense sans égal. Cette technologie est spécifiquement conçue pour fonctionner en synergie parfaite avec nos cosmétiques bioluminescents, activant les produits de soin par une puissante concentration d'énergie lumineuse. Le résultat ? Des effets immédiats, visibles et durables, transformant chaque session de soin en une expérience exceptionnelle. En seulement 15 minutes, la méthode de soin PROCYON se présente comme une alternative sérieuse à la médecine esthétique, soutenue par des certifications issues d'études cliniques.

LE SOIN SUR-MESURE

Chaque protocole FHOS combine deux produits de soin répondant aux besoins spécifiques pour obtenir des résultats vraiment visibles sur la peau.

La gamme de 7 produits de soin photobioluminescent offre plus de 20 options de traitement qui conduisent à des résultats médico-esthétiques surprenants :

- Exfoliation
- Effet tenseur
- Volume
- Purifiant
- Hydratant
- Cellulite
- Charbon actif

**TOUTES LES CLIENTES
QUI L'ONT ESSAYÉ SONT RAVIES
DES RÉSULTATS DÈS LES PREMIÈRES
15 MINUTES DE TRAITEMENT !**

PRO

LA TECHNOLOGIE BIOLUMINESCENTE

LA GAMME DE PRODUITS FHOS



Explorez la technologie bioluminescente avec FHOS, une innovation cosmétique activée par l'énergie photoluminique de la technologie PROCYON. Cette gamme de soin nanotechnologique amplifie ses bienfaits dès l'activation lumineuse de ses actifs, offrant des transformations rapides et efficaces de la peau. Disponible pour tous, FHOS offre la promesse de soins sur mesure et des résultats visibles instantanément.

LA PUISSANCE DE LA LUMIÈRE

La technologie PROCYON, au cœur de notre innovation, utilise une lumière photoluminique intense pour activer nos cosmétiques bioluminescents, offrant des effets immédiats et durables. Cette approche, validée par des études cliniques, se positionne comme une alternative à la médecine esthétique.

LE PROCÉDÉ FHOS EXCLUSIF

L'efficacité remarquable de nos produits repose sur notre procédé exclusif : l'utilisation de sphères bioluminescentes à faible poids moléculaire, capables de pénétrer profondément dans la peau. Une fois activées par l'énergie intense spécifique de la technologie PROCYON, ces sphères déclenchent une réaction catalytique, libérant progressivement les principes actifs dans les différentes couches de la peau. Cette méthode d'activation unique maximise la diffusion des bienfaits, assurant une efficacité et des résultats inégalés dès les premières 15 minutes de traitement.

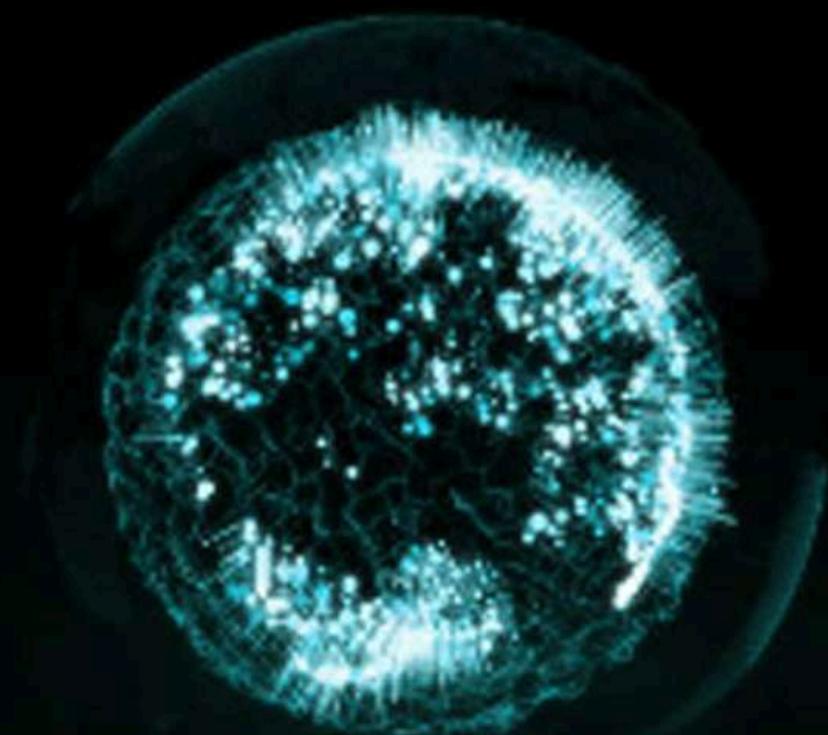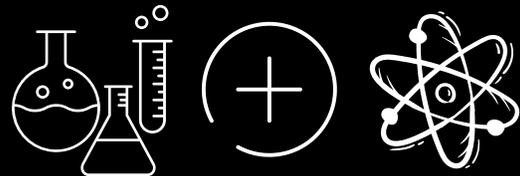

FHOS : UNE SOLUTION SUR MESURE AVANCÉE

La gamme de produits FHOS LUMINESCENTE et la technologie FHOS PROCYON réinventent l'approche de la beauté et du soin de la peau, offrant une solution sur-mesure avancée qui répond aux exigences des tendances du marché. En conjuguant l'efficacité nanotechnologique et la puissance de la lumière, FHOS ouvre la voie à une nouvelle ère de soins cosmétiques, où chaque application de soin se transforme en une véritable cure de jeunesse et de beauté pour votre peau.



PRO

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE ET PLURIDISCIPLINAIRE

LE MODE FHOS VISAGE & CORPS

Révolutionnaire, il offre un contrôle total de la lumière en générant une capacité lumineuse de haute intensité à l'intérieur de la peau, sans ajouter de chaleur. Cette capacité permet de vectoriser les principes actifs de manière optimale et rapide, offrant ainsi une alternative efficace aux traitements médico-esthétiques. PROCYON est le seul équipement sur le marché à proposer ce système novateur, offrant une gamme sur-mesure de traitements bioluminescents avec des résultats remarquables en un temps record.



LE MODE AVANCÉ DE PROCYON

Il permet de configurer des paramètres auparavant limités dans d'autres technologies telles que le laser, l'IPL et les systèmes d'énergie lumineuse. Il offre une autonomie de travail totale avec des protocoles préétablis au niveau médical et clinique, réduisant ainsi la marge d'erreur et les risques tout en garantissant les meilleurs résultats. Ce programme fait du Procyon un outil unique et indispensable en tant que plateforme lumineuse avancée dans les centres médicaux esthétiques de qualité.



LE MODE PHOTO-ÉPILATION DE PROCYON

Il offre un traitement d'épilation par lumière pulsée, basé sur le principe de la photothermolyse sélective. Cette méthode permet de détruire sélectivement les cellules germinatives du follicule pileux grâce à l'absorption de la lumière par les chromophores cibles tels que la mélanine, l'hémoglobine et l'eau. PROCYON propose deux modes d'épilation, par pulsation et en rafale, pour répondre aux besoins spécifiques des patients.



FHOS PROCYON : 5 FILTRES SPÉCIFIQUES



À chaque soin,
un filtre spécifique
selon le type de peau
et la problématique à traiter.

590 nm : Rajeunissement de la peau foncée (IV-VI).

530 nm : Rajeunissement des peaux claires (I-III).

480 nm : Peau comédogène pour peau foncée (IV-VI).

430 nm : Peau comédogène pour peau claire (I-III).

CELLULE : Lipolitique, longueur d'onde plus longue. pour travailler sur le tissu adipeux (uniquement corps).

 **PRO**

UNE UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE

Découvrez la simplicité et l'intuitivité de la technologie FHOS grâce à son écran tactile qui guide pas à pas le praticien tout au long du processus. En quelques clics, accédez à toutes les fonctionnalités nécessaires en toute facilité.

L'icône SETTINGS, située en haut à droite de l'écran, est votre passerelle vers une personnalisation complète de l'appareil. En naviguant sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez ajuster différents paramètres pour répondre à vos besoins spécifiques.

- Dans la section GÉNÉRAL, vous pouvez modifier les paramètres de la pédale pour une utilisation optimale. En accédant à INTERFACE, personnalisez la couleur de l'interface ou choisissez la langue du menu selon vos préférences.
- La section RÉSEAU vous permet de vous connecter à Internet, une opération nécessaire au moins une fois par mois pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Quant à la section À PROPOS, retrouvez toutes les informations essentielles concernant votre équipement ainsi que ses manuels d'utilisation.
- Grâce à la fonction MATÉRIEL, vous pouvez vérifier la version du logiciel et de l'appareil dont vous disposez, assurant ainsi une maintenance facile et efficace. Enfin, dans la section PIÈCE À MAIN GAUCHE ET DROITE, suivez le nombre de prises de vue réalisées et vérifiez la connexion des pièces à main à l'appareil.

**AVEC FHOS,
LA CONFIGURATION
DE VOTRE APPAREIL
EN QUELQUES CLICS.**



PRO

LES PERFORMANCES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La technologie FHOS représente une avancée révolutionnaire dans le domaine des soins esthétiques, offrant des performances inégalées et des caractéristiques uniques qui redéfinissent les normes de la beauté en institut.

Longueur d'ondes :

Variable de 640-1200 nm et de 420-1200 nm selon le soin.

Type de lumière :

Lumière en mode continu et en mode pulse et en rafale selon le soin.

Énergie :

1-60 J/cm².

Pièces à main :

1 pièce à main avec un filtre fixe de 640nm. et
1 pièce à main avec un système multifiltre interchangeable.

Puissance de travail :

2300 W.

Poids de l'équipement :

47kg.

Dimensions :

36cm X 106cm X 46cm.

Rapidité :

Protocole de soin de 15 minutes.

Confort :

Traitement non invasif et agréable.

Efficacité :

Couverture parfaite de la zone traitée.

Sécurité :

Aucun risque de lésion.

Rendement :

Économe en consommables, longévité de la lampe.

Rentabilité :

Retour sur investissement optimal.





FHOS : LA COSMÉTIQUE BIOLUMINESCENTE

L'EXPERTISE DU PROTOCOLE SUR-MESURE

FHOS PROCYON se distingue par sa capacité à offrir des soins personnalisés, révolutionnant ainsi l'approche traditionnelle de la technologie en soin esthétique.

Ce système unique en son genre adapte ses traitements lumineux pour répondre précisément aux besoins spécifiques de chaque individu, selon son type de peau, la problématique à traiter et les produits de soin bioluminescents sélectionnés. De l'exfoliation à la purification, en passant par l'illumination de la peau, l'effet tenseur, ainsi que le remodelage du visage et la sculpture de la silhouette.

Au cœur de FHOS PROCYON réside une technologie de lumière innovante qui, contrairement aux méthodes conventionnelles, permet une modulation précise des longueurs d'onde grâce à des filtres spécifiques développés exclusivement pour FHOS PROCYON.

Cette spécificité permet d'atteindre des objectifs esthétiques variés :

- Exfolier doucement pour révéler une peau neuve et éclatante.
- Purifier en profondeur, libérant la peau des impuretés et des excès de sébum.
- Illuminer le teint, offrant à la peau un rayonnement naturel et une homogénéité de couleur.
- Produire un effet tenseur, réduisant l'apparence des rides et des ridules pour une peau visiblement rajeunie.
- Remodeler le visage et resculpter la silhouette, affinant les contours, réduisant l'effet peau d'orange et améliorant l'élasticité de la peau.

**UN SOIN FLASH
PAR SEMAINE
ET PAR ZONE SPÉCIFIQUE
EST RECOMMANDÉ.**



LE DÉROULÉ D'UN PROTOCOLE DE SOIN

Le protocole FHOS s'appuie sur une gamme de produits de soin bioluminescents accompagné d'outils experts et de l'appareil PROCYON doté d'un écran tactile pour guider pas à pas le praticien. On lance le programme de soin adapté et on active le soin bioluminescent à l'aide d'une poignée que l'on fait glisser sur le visage, le cou ou la zone spécifique du corps après un diagnostic pour analyser la peau, identifier le protocole de soin personnalisé et les produits FHOS correspondants.

**RECHARGE ET STIMULATION
DE L'ÉNERGIE DES CELLULES
POUR UN EFFET PROGRESSIF
DE 15MN À 120 JOURS.**

LES ÉTAPES FHOS

Étape 1 : Nettoyage - 1 minute

Commencer par nettoyer avec le désinfectant assainissant sur peau démaquillée. Puis, protéger des yeux avec des lunettes spécifiques.

Étape 2 : Activation - 6 minutes

Recharger les cellules dermiques pour une catalysation maximale des actifs à des niveaux profonds avec un effet progressif de 15mn à 120 jours. Application du premier soin FHOS en utilisant un pinceau éventail. Choix du filtre en fonction du programme et du phototype. Ajustement des paramètres en fonction du produit et de la tolérance. Application sur le visage et le cou ou zone corps spécifique durant 5 minutes.

Étape 3 : Stimulation - 7 minutes

Solliciter l'énergie des cellules permet de stimuler la régénération cellulaire avec un effet immédiat. Utilisation du pinceau éventail pour application du produit. Mélange du soin avec 10ml de gel conducteur. Application sur le visage et le cou durant 5 minutes. Retrait de l'excédent de gel avec une serviette humide.

Étape 4 : Protection Solaire - 1 minute

Appliquer FHOS Sunscreen 50 ou un écran solaire.



UN SOIN DE COURTE DURÉE

Un véritable atout pour les professionnels de l'esthétique et leurs clients, combinant efficacité, rapidité et praticité.

Le protocole FHOS, avec son avantage de soin de courte durée de seulement 15 minutes, représente un véritable atout pour les professionnels de l'esthétique et leurs clients. Cette rapidité d'exécution permet d'obtenir des résultats efficaces en un laps de temps réduit, répondant ainsi aux exigences de la vie moderne où le temps est précieux.

Grâce à ce protocole, les patients peuvent bénéficier d'une amélioration significative de leur peau en un minimum de temps, ce qui convient parfaitement à leur emploi du temps chargé. De plus, la possibilité de bénéficier d'un traitement complet en seulement 15 minutes offre une grande flexibilité, permettant aux clients de s'intégrer facilement dans leur routine quotidienne.

Pour les professionnels, l'avantage du soin de courte durée de 15 minutes du protocole FHOS réside également dans une meilleure gestion du temps et une augmentation de la rentabilité. En offrant des traitements rapides mais efficaces, ils peuvent accueillir plus de clients tout en maintenant la qualité des soins, ce qui se traduit par une augmentation du chiffre d'affaires et une satisfaction client accrue.

**DES RÉSULTATS OPTIMAUX
EN UN MINIMUM DE TEMPS.**



PRO



FHOS
EQUIPMENT

PRO

FHOS | 14

RÉVOLUTIONNEZ VOS SOINS POUR HOMMES

PRO

À l'avant-garde de la technologie et de la recherche en esthétique, FHOS conçoit des solutions qui non seulement répondent aux défis uniques rencontrés par la peau des hommes mais les anticipent également. Que ce soit pour combattre les signes de l'âge ou pour répondre aux spécificités post-rasage, FHOS redéfinit les standards de soin, assurant une peau plus saine, plus forte et visiblement rajeunie.



FHOS| 15

FHOS
ÉQUIPEMENT ESTHÉTIQUE

LE SOIN INNOVANT QUI REDÉFINIT LA BEAUTÉ MASCULINE.

FHOS s'engage à bousculer les codes du secteur en introduisant des innovations qui répondent aux besoins spécifiques de la peau masculine, tout en offrant une réponse efficace et ciblée aux signes de l'âge.

UNE AVANCÉE MAJEURE DANS LA LUTTE CONTRE LES SIGNES DE L'ÂGE

En parallèle, FHOS incarne une avancée révolutionnaire dans la lutte contre les signes du vieillissement. Utilisant une fusion bioluminescente d'ingrédients actifs et de technologies de pointe à la lumière intense, notre solution stimule la régénération cellulaire, combat les rides, et restaure l'élasticité, offrant ainsi une peau visiblement rajeunie et éclatante.



ADAPTATION AUX BESOINS UNIQUES DE LA PEAU MASCULINE

HYDRATING
sérum - suero - sérum

Reconnaissant les particularités de la peau des hommes, plus épaisse, sujette à l'acné, aux impuretés, et affectée par le rasage. Cette innovation FHOS offre des solutions spécifiques qui traitent non seulement les irritations et sensibilités post-rasage mais aussi promeuvent une peau plus saine et résiliente, répondant ainsi de manière proactive aux défis uniques rencontrés par nos clients masculins.

VERS UN FUTUR DE SOINS INCLUSIFS

FHOS reste à la pointe de l'innovation, déterminé à enrichir continuellement l'offre avec des solutions qui non seulement répondent aux besoins actuels mais anticipent aussi les tendances futures en matière de soins de la peau.

LA GAMME PRO



**DES SOINS EXPERTS
À USAGE PROFESSIONNEL À ACTIVER
AVEC L'ÉNERGIE PHOTO-LUMINIQUE**



01 EXFOLIANT



02 VOLUME



03 TENSEUR



04 PURIFIANT



05 HYDRATANT



06 CELLULITE



07 CALMING



00 CLEANSER PRO

CHARBON ACTIF

22 soins par Flacon pompe

PRO



LA TECHNOLOGIE

FHOS PROCYON





LA GAMME RETAIL

**DES SOINS EXPERTS
À USAGE DES CLIENTS**



SÉRUM EXFOLIANT



CRÈME EXFOLIANTE



SÉRUM PURIFIANT



CRÈME PURIFIANTE



SÉRUM HYDRATANT



CRÈME HYDRATANTE



SÉRUM REJUVENATION



CRÈME REJUVENATION



PROTECTION SOLAIRE SPF50



MASQUE LED



DEMAQUILLANT

PRO



 **PRO**

VOTRE SOIN FHOS OÙ QUE VOUS SOYEZ.

Une peau embellie,
équilibrée et rajeunie
grâce à la puissance de
la lumière et de la
bioluminescence où que
vous soyez.

Un soin de la peau complet sans se rendre en
institut mais depuis chez soi avec la gamme
FHOS PUBLIC BIOLUMINESCENT.

Avec sa gamme de soin bioluminescent à activer
avec le masque LED, utiliser tous les bienfaits
de la luminothérapie en activant les LEDs
bleues, rouges et oranges, ... Tout cela pour
offrir un soin complet à votre peau et la
sublimier où que vous soyez.

Résultat : une peau régénérée, plus douce et
lumineuse.

FHOS PUBLIC BIOLUMINESCENT se distingue en
tant que ligne cosmétique bioluminescente
exclusive, révélant la beauté par la lumière
naturelle et la luminothérapie pour multiplier
ses bienfaits.

L'action synergique de ses multiples actifs
bioluminescents et du masque LED FHOS agit
en profondeur pour améliorer l'épiderme,
optimiser et réguler le manteau hydrolipidique,
réduisant de manière significative les signes de
l'âge.

Les résultats spectaculaires obtenus avec FHOS
PUBLIC BIOLUMINESCENT révèlent une peau
sublimée, équilibrée, hydratée et rajeunie.



PRO

UN APERCU AVANT- APRÈS SOIN

Une efficacité visible dès la première séance de 15 minutes
et des résultats spectaculaires à trois séances.



CONTACT



ESTHETIQUE^{PRO}